



# SELEKT™

## VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION AF SELEKT PUMPEVÆRK MAINTENANCE AND CLEANING OF SELEKT CATTLE PUMP ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA POMPE SELEKT

### SKIFT AF STANG, TOPSTYKKE ELLER STEMPEL ◦ CHANGING OF PUMP ROD, TOP PIECE OR WASHER ◦ REMPLACEMENT DE LA TIGE, LA PIÈCE SUPÉRIEURE, OU DU JOINT

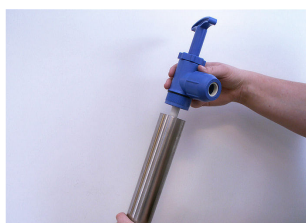

1. Skru topstykket af mod uret og åbn pumpen.  
*Unscrew top piece (against the clock).*  
*Dévisser la partie supérieure (dans le sens antihoraire).*

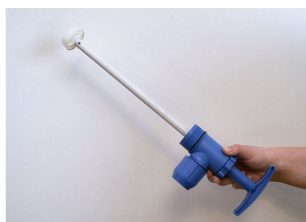

2. Pumpe med stempel.  
*Pump rod with top piece and washer.*  
*Tige de la pompe, pièce supérieure et joint.*



3. Splitten trækkes ud, og stempel, stang eller topstykke udskiftes.  
*Remove split and change pump rod, top piece or washer.*  
*Retirer le clip et changer la tige de la pompe, la pièce supérieure, ou le joint.*



4. Stemplet påsættes.  
*Mount washer and insert new split.*  
*Monter le joint et insérer à nouveau le clip.*




5. Splitten sættes i og pumpen samles igen.  
**OBS!** Topstykket må ikke strammes for hårdt, da det kan svække delen.

*Assemble the pump again.*  
*Assembler de nouveau la pompe.*

**NB!** *Tightening the top piece too much could weaken this part.*

**NB !** *Visser excessivement la pièce supérieure peut affaiblir cette partie.*

## VEDLIGEHOJDELSE AF O-RING ◦ MAINTENANCE OF GASKET ◦ ENTRETIEN DU JOINT

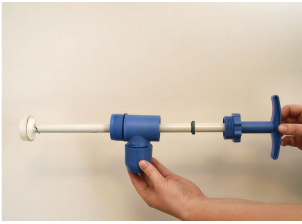

1. Skru det øverste af topstykket af.  
*Unscrew the top piece of pump.*  
*Dévisser la pièce supérieure de la pompe.*



2. Sprøjt O-ringen med silikonespray eller silikonefedt og skru topstykket på igen.  
*Spray the gasket with silicone and screw on the top piece again.*  
*Vaporiser le joint avec du silicone puis revisser la pièce supérieure.*

## STUDS PÅ SLANGE ◦ TIP OF THE PLASTIC HOSE ◦ EXTREMITÉ DU TUBE EN PLASTIQUE



1. Studsen på slangen kan fra tid til anden blive ridset af koens tænder.  
*The tip of the plastic hose can be scratched by the teeth of the cow.*

*L'extrémité du tube en plastique peut être rayée par la dentition de la vache.*



2. Ridser fjernes med sandpapir, så de ikke irriterer koen.  
*Scratches can be removed with sandpaper to prevent irritation.*  
*Pour prévenir les irritations, les rayures peuvent être gommées avec du papier de verre.*

## RENGØRING ◦ CLEANING ◦ NETTOYAGE

1. Pumpesystemet rengøres med desinfektionsmiddel og vand (**ikke over 50° C**).

*Clean with disinfection cleanser and plenty of warm water (max. 50° C / 120° F).*

*Nettoyer avec un désinfectant léger et de l'eau tiède. (max 50°C)*

